

Легкое и точное позиционирование имплантата без проведения КТ

Smart Guide KIT


Сформированный 3D дизайн

- Смарт-шаблон облегчает руководство по производству благодаря сформированному 3D дизайну, который подходит к различным видам дефектов



Достаточная длина втулки


- Длина втулки обеспечивает точное направление сверления

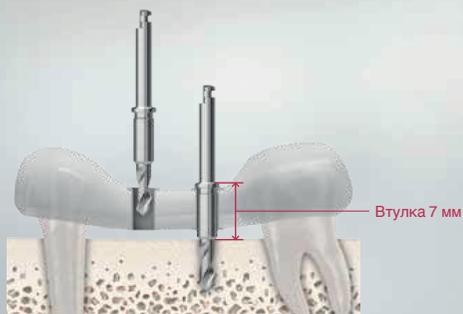

Саморегулирующаяся втулка и Направляющий пин

- Соединение смарт-шаблона с направляющим пином для автоматического поддержания расстояния на 1 мм

Примеры использования шаблона на 2 имплантата (широкий)

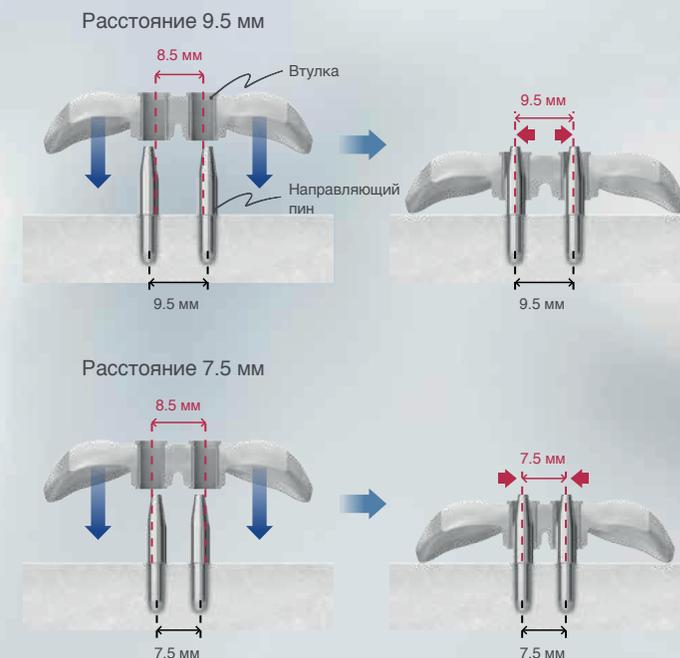


Компоненты набора Smart Guide KIT

Single Guide	Small Guide	Large Guide	Free-end Guide	Проверочная втулка	Ø2.2 Twist Drill	Ø3.0 Twist Drill	Направляющий пин (4шт.)	Круглый бор	Twist Drill (для рабочей модели)
Шаблон на 1 имплантат	Шаблон на 2 имплантата (узкий)	Шаблон на 2 имплантата (широкий)	Шаблон с 1 опорой						

Легкое и точное позиционирование имплантата без проведения КТ

Smart Guide KIT

Руководство по использованию Смарт шаблона

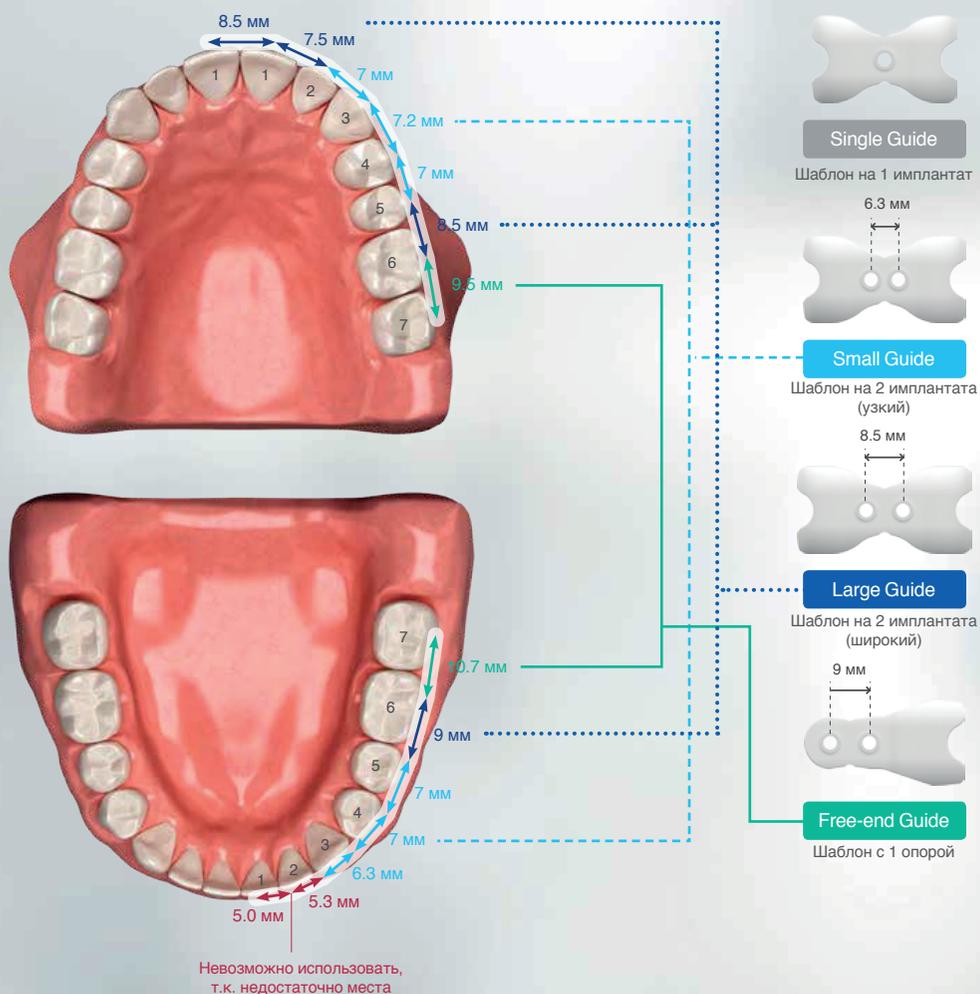

Применение

* Так как смарт-шаблон нестерильный, рекомендуется для дезинфекции использовать раствор гексамидина или спирт. Автоклавирование и отмачивание в кислотах не разрешается

Лаборатория / рабочая модель

